

Rådgivende koder, årsag og handling

Kode	Årsag	Øjeblikkelig handling
2	AutoPulse har registreret en ændring i spændingen i Lifeband <i>(Denne meddelelse kan forekomme, når patienten eller Lifeband er ude af position, eller hvis Lifeband åbnes under aktiv drift)</i>	Kontrollér at Lifeband er korrekt lukket. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart
3	Batteriet er ikke skubbet helt ind eller er beskadiget	Fjern batteriet. Tjek stikket på batteriet for skader. <i>Hvis stikket ikke er beskadiget:</i> Isæt batteriet og kontrollér at det er placeret korrekt og sidder ordentlig fast. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart. <i>Hvis stikket er beskadiget:</i> Åben Lifeband. Start straks manuel HLR. Tag AutoPulse ud af drift og kontakt Medidyne ApS
4 el. 44	Batteriet er ikke opladt eller batteriet er defekt	Åben Lifeband. Start straks manuel HLR. Udskift batteriet. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart
7	Patienten ligger ikke korrekt på AutoPulse platformen	Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart. <i>Bemærk: Brug evt. skulderremmene til at fastholde patienten korrekt på AutoPulse platformen</i>
11	Udluftningshullerne på AutoPulse er blokeret, eller omgivelserne er for varme	Åben Lifeband. Start straks manuel HLR. Sluk AutoPulse. Kontrollér udluftningshullerne/ventilationen for obstruktion. Tænd AutoPulse. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart
12	AutoPulse har registreret, at Lifeband ikke er korrekt i sat	Sørg for, at Lifeband (under enheden) er korrekt placeret i drivakslen herunder båndklipsen og at drivakslen frit kan rotere efter indsættelse af Lifeband
16 el. 26	Obstruktion mellem Lifeband og patient, eller Lifeband er snoet	Åben Lifeband. Fjern eventuel obstruktion. Tjek at Lifeband ikke er snoet. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart
17	Lifeband er snoet eller batterispændingen er for lav	Åben Lifeband. Start straks manuel HLR. Tjek batteriet og Lifeband. Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart
18	AutoPulse har registreret, at enten patientens bryst eller modstand er for lille, eller at der ikke er en patient på platformen	Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart. Hvis fejlkoden ikke forsvinder, kan patienten være for lille. I så fald, start straks manuel HLR
27	Lifeband trukket op for hurtigt	Træk Lifeband op til start position. Kontrollér at patient og Lifeband er korrekt placeret. Tryk Genstart

For alle andre rådgivnings- og fejlkoder åben øjeblikkelig Lifeband og start straks manuel HLR. Kontakt efterfølgende Medidyne ApS for assistance.