


Manchetter

Til Microlife blodtryksmålere

At bruge den rigtige manchet er mindst lige så vigtigt som selve blodtryksmåleren. Den rigtige manchet størrelse og dens form er begge centrale elementer i en nøjagtig blodtryksmåling.

Derfor findes der på alle Microlifes manchetter et indeksområde, der hjælper dig med at se, om manchetten har den korrekte størrelse.

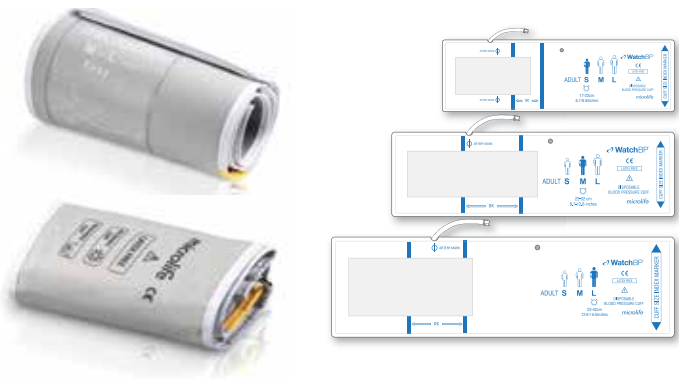

Et komplet manchetsortiment til alle Microlife blodtryksmålere

Microlifes manchetter er tilgængelige som både én-patients og flergangsmanchetter. Flergangsmanchetterne findes i en blød (Soft) og stiv (Rigid) model og er udstyret med en farvet studs, som passer til alle Microlifes blodtryksmålere.

Størrelse / mål i cm	S / 17-22 cm	M / 22-32 cm	L / 32-42 cm	M-L / 22-42 cm	L-XL / 32-52 cm
En-patients manchet	X	X	X		
Soft manchet	X	X		X	X
Rigid manchet				X	



Hver studs er markeret med en unik farvekode:

Blå studs er kalibreret til S manchetter

Grå studs er kalibreret til M og M-L manchetter

Sort/gul studs er kalibreret til L og L-XL manchetter

L-studs bruges med S, M og M/L 3G-manchetter på 2G-apparater og til BP A3L Comfort

Sort/sort studs til brug med L og L/XL 3G-manchetter på 2G-apparater

Det er vigtigt at have en jævn rate på udtømningen af luft i manchetten for at sikre en præcis blodtryksmåling. Microlifes studser har en integreret og kalibreret ventil for at optimere raten på tømningen af den enkelte manchet størrelse, så blodtryksværdierne bliver korrekte. Derfor er det vigtigt, at man anvender den korrekte studs til den enkelte størrelse manchet.